

# インスリン補助具 使用説明書

三田理化メディカル株式会社

2021/06/16

本品は、インスリンを使用する際の滑りを防止する補助具です。  
また、本品は医療機器に当たるものでもありません。

本品は、現状では以下の自己注射器製品に対応しています。  
ノボルディスクファーマ社のフレックスタッチ® フレックスペン®、  
イーライリリー社のミリオペン®、  
アベンティス社のソロスター®  
富士フイルム社製 BS注キット「FFP」

1 補助具上側へ、  
インスリン注射器本体の針を刺す側から、  
しっかり留まる位置まで挿し入れてください。

2 補助具上部の切り口でインスリンの単位が  
確認できるような状態にしてください。

3 アルミサポートの形を  
人差し指の付け根の関節を囲うように整えると  
ぐらつきを抑えることができます。



4 インスリンの使用を始めたら、装着したままで保管できます。  
ただし、保管時インスリン注射器本体のカバーは、つけておいてください。  
また、インスリンの針は毎回交換することも忘れないようにしてください。



本品の使用に当たっては、  
必ず薬剤師の指導を受けるようにしてください。  
使用に際し何か疑問点を感じたら、  
すぐに薬剤師に相談するようにしてください。