

プランジャー アシスト リング

持ち替える必要がなく
針先がぶれません

特許・意匠 登録済み


ブロック注射の逆流確認、
超音波エコー使用時に、
片手で穿刺しやすくなります。



手技、指サイズにより選択
SS、S、M、Lの4サイズ

オートクレーブ滅菌対応
材質：ポリプロピレン


各社シリンジに取付可能
2.5、5、10、20mlに適合

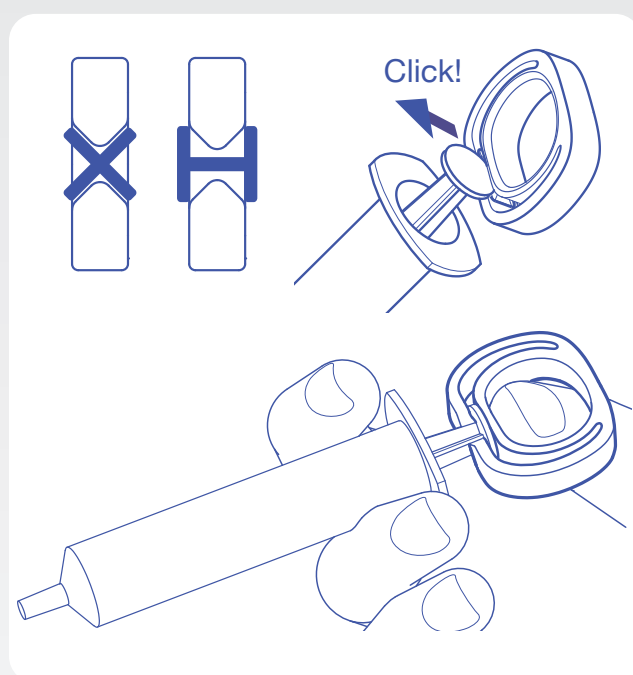

プランジャー アシスト リング


使用方法

- プランジャーの横方向から差し込み、プランジャー軸をVツメで挟みます。
- カチッと音がするまでしっかりと取り付けてご使用ください。
- リングの爪が折れたり変形した場合は使用しないでください。

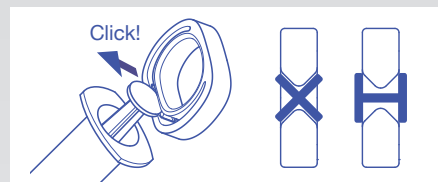

製品仕様

- オートクレーブによる滅菌、再使用が可能です。(材質:ポリプロピレン)
- 各社シリンジ(テルモ製、ニプロ製、トップ製) 2.5ml、5ml、10ml、20ml に適合します。
- SS、S、M、Lの4サイズがあります。指の大きさや手技に合う適切なサイズをお選びください。

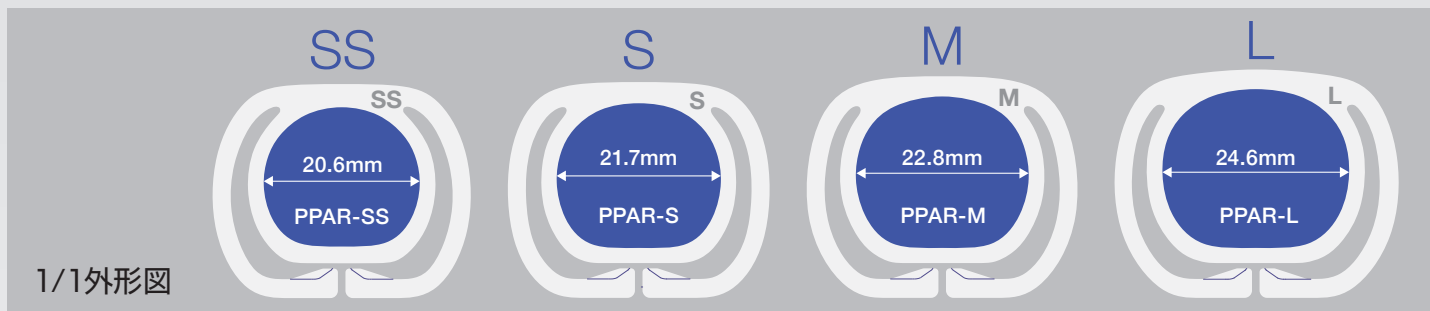

1/1外形図

梱包仕様

- 各サイズ別に、10個入りパッケージ=1商品単位です。



各サイズ別：箱



10個入/1箱

商品規格

品名	サイズ/タイプ	入数	型式	JANコード
プランジャーアシストリング	SS	10	PPAR-SS	4589413370048
	S	10	PPAR-S	4589413370031
	M	10	PPAR-M	4589413370024
	L	10	PPAR-L	4589413370017

未滅菌品

Non-sterilized

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041