



本品を安全に正しくご使用いただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、十分にご理解のうえご使用ください。

本品はショルダーハーネス SHK-1 (クラス 1) の後継商品ですが医療機器ではありません。

本品はパーソナルユース(自宅介護用)することを目的に開発されました。(患者同士間の)共用利用は避けください。

## 1 使用上の注意

- ベルト等にゆるみ・ほつれがあった場合、ただちに使用を中止してください。
- 本品使用中に腕を上げた状態が適切な位置となるよう、ベルトの長さを調節してください。
- 各ベルトの耐荷重は腕を預ける範囲で設計されています。体重をかけたりすると破損の恐れがあります。
- エアクッション内蔵のため鋭利なもので刺すなどすると変形して元に戻りません。
- 給湯温度(～60℃)以上の高温のお湯をかけないでください。
- アルコールで表面を拭くことができます。○乾かす際は日陰干しをしてください。○耐用使用期間は3ヶ月です。

## 2 ご使用前の確認および準備

出荷時は右腕固定用に組んであります。左腕固定の場合は上腕ベルトと補助ベルトを組み替えてご使用ください。


### ■肩パッドの使用

圧迫感を軽減するために肩パッドを肩と首の中間辺りでご使用ください。



### ■補助ベルトの組み方

補助ベルトが回転しないように本体上部の補助ベルト通しをご利用ください。

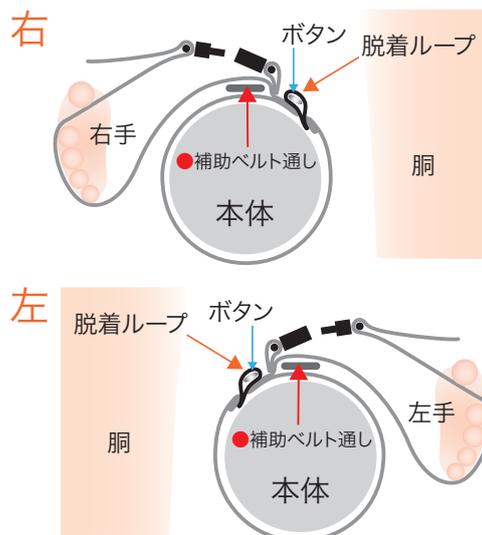

### ■肩ベルトによる腕の角度の調整

ベルトの長さを調節で本体高さを変え、腕の角度の調整が可能です。腕が適切な位置・角度となるようベルトの長さを調節してください。

角度 大



角度 小



### ■補助ベルトの利用方法

- 通常は手首をベルトに通してください。
- 親指を掛けると前後方向が安定します。
- 前面のベルトを手掴みに利用可能です。



### ■上腕ベルトの組み方

体格に合わせてベルト通しを選んでください。



お問い合わせ先

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102  
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041

[raccoon-medical.co.jp](http://raccoon-medical.co.jp)

