

## 採血静注練習キット Sensitiv<sup>®</sup> センシティブ

穿刺と微細な感覚を学ぶ!

特許出願中




針の深度、方向を容易に確認

繰り返しても目立たない注射痕

駆血帯を用いた怒張を再現

駆血帯の外し忘れ防止を体得

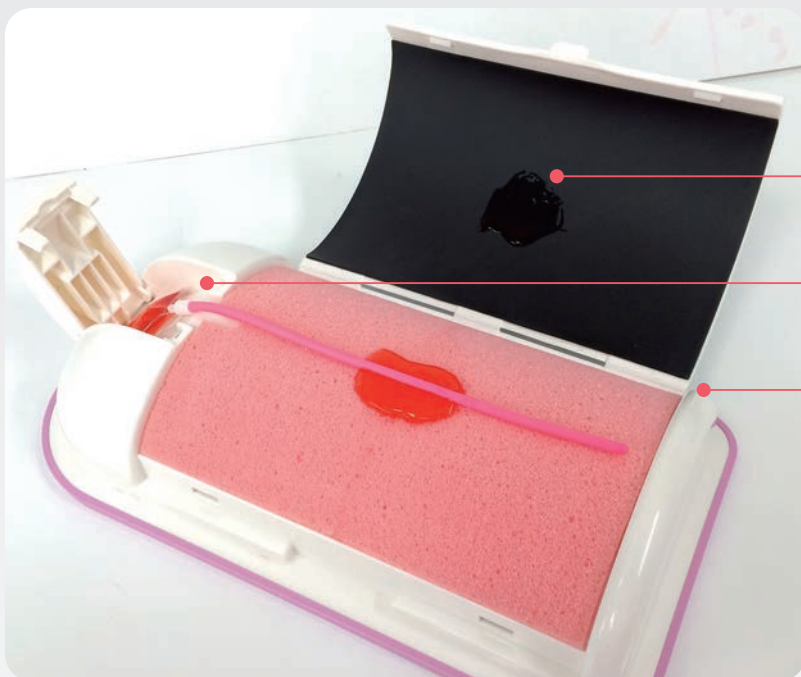

いつでも! どこでも! すぐ実習

皮下組織シートを簡単に交換

血液バックは1回毎の使い捨て

シリンジ、針、血液バック等を  
本体内に収納

寸法: W254×D135×H56  
重量: 260g

三田理化メディカル株式会社





〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102  
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041

[raccoon-medical.co.jp](http://raccoon-medical.co.jp)



## 採血静注練習キット Sensitiv® センシティブ

### 使用方法


<p>セット</p>  <p>1 模擬血液パックを本体にセットします。</p>	<p>加圧</p>  <p>2 蓋を閉めることにより、模擬血液パックが加圧され、皮膚カバーの上から血管が確認できます。</p>	<p>穿刺</p>  <p>3 静脈留置針等を本体へ穿刺します。</p>	<p>確認</p>  <p>4 血管外穿刺の確認ができます。</p>
---	--	--	---

### 製品仕様

本体寸法	W254×D135×H56mm
重量	260g
本体セット付属品	模擬皮膚カバー 1 枚 / 模擬皮下組織シート 1 枚 / 模擬血液パック 10 本

※仕様変更になる場合がございます。あらかじめ御了承ください。

### 外観図

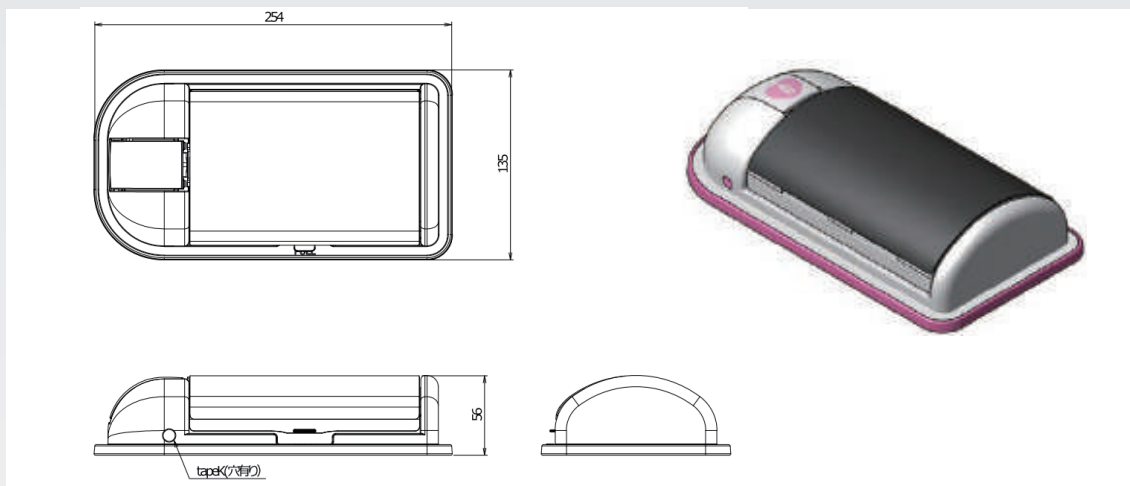

### 商品規格

品名		サイズ/タイプ	梱包	型式	JAN コード
採血静注練習キット センシティブ	本体	スターターキット・標準タイプ	1 個	KCC-A-15-00	4589413370093
		スターターキット・タイプ K	1 個	KCC-A-16-00	4589413370109
	消耗品	模擬血液バッグ	10 本	KCC-A-15-01-01	4589413370116
	交換部品	模擬皮膚カバー取り替えキット	1 個	KCC-A-13-01-01	4589413370123
		模擬皮下組織取り替えキット	1 個	KCC-A-13-01-02	4589413370130

三田理化メディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102  
TEL 03-3812-5394 FAX 03-3812-5041